
















תפעול מצלמת MagniLink Student ממקלדת ומהתפריט

סמל בתפריט	המשמעות	פקודה ממקלדת
	צבע טבעי / אפור	F1
	צבעי ניגודיות	F2
 	הגדלת תצוגה הקטנת תצוגה	חץ למעלה חץ למטה
	מבט החוצה / סביבתי	Control+O
 On	מיקוד אוטומטי	Control+J
 	בהירות גבוהה בהירות נמוכה	חץ ימינה חץ שמאלה
 	קו קריאה / מיסוך	Control+Up/Left arrow Control+Down Right arrow
 	הגבר עוצמת תאורה הנמך עוצמת תאורה (3 דרגות הארה)	Control+7 Control+6
 	שמור תמונה שמור תמונה מהר הצג תמונה הצג תמונה מהר	F5 Shift+F5 F6 Shift+F6
 	שמור סרטון שמור סרטון מהר נגן סרטון (כולל שמע) נגן סרטון מהר (כולל שמע)	Control+F5 Control+Shift+F5 Control+F6 Control+Shift+F6

	סיבוב תצוגה ימינה סיבוב תצוגה שמאלה	Control+R Control+Shift+R
	תצוגת מראה	Control+I
	הקפאת תצוגה פעיל / לא פעיל	Control+F
	חצאי תצוגה	F8 Control+F8
	חלון תצוגה בחזית	Control+A
	עזרה (מדריך באנגלית)	

פקודות שלא קיימות בתפריט הסמלים בתצוגה

Control+C העתק תמונה

Control+M מזער תצוגה. לשיחזור בצע **Alt+Tab** או קליק שמאלי של עכבר על אייקון בתפריט המשימות

Control+F1 הסתר תפריט סמלים

Control + הגדל תפריט סמלים


Control - הקטן תפריט סמלים

F9 הגדרות

שימוש בגלגלת העכבר

כשהמיקוד עם סמן העכבר נמצא בחלון ה **Magnilink PCviewer**, סמן העכבר משנה את צבעו וצורתו.

ניתן להשתמש בגלגלת העכבר על מנת להגדיל או להקטין את תוכן החלון.

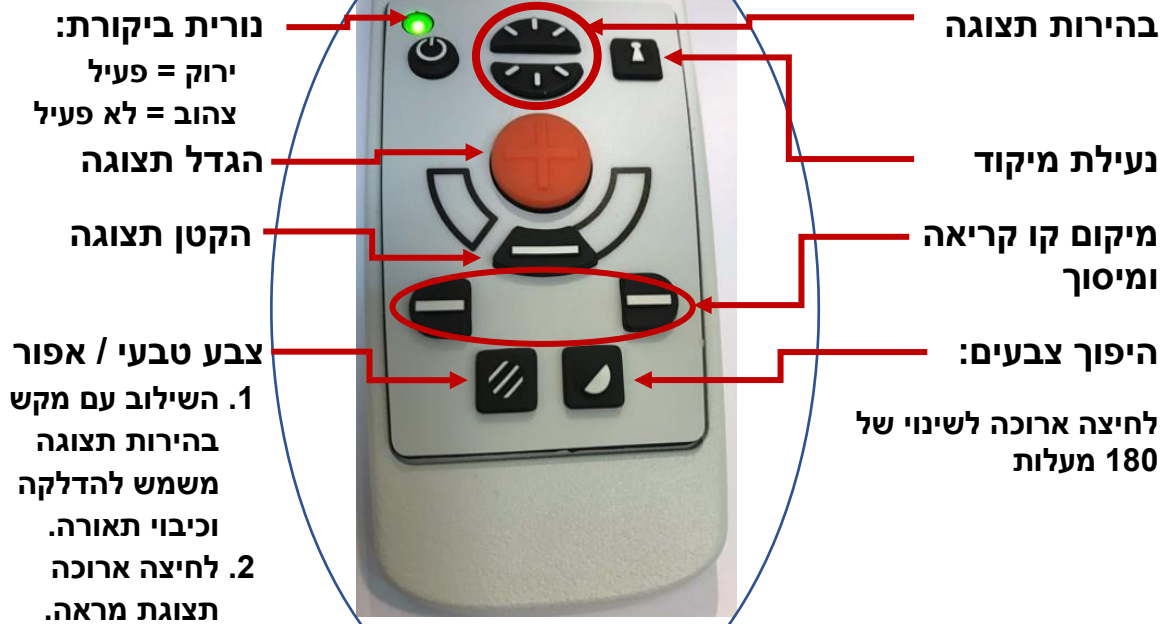

חיבורים מאחור



סדר פעולות להפעלת המצלמה

1. יש להציב את המצלמה על משטח יציב / שולחן
 2. יש לפרוס את זרוע המצלמה ואת שתי זרועות הבסיס
 3. יש לחבר את כבל ה-USB בצד אחד למצלמה ובצידו השני למחשב
 4. יש ללחוץ על לחצן ההפעלה הממוקם על בסיס המצלמה ולוודא שהנורה דולקת בצבע ירוק
 5. יש להפעיל את תוכנת MagniLink PCViewer
- הערה,** ניתן ללחוץ על מקש **F8** במקלדת המחשב על מנת לשנות את אופי תצוגת התוכנה