

מערכת הגדלה מסוג Mercury13

טמ"ס מסוג מרקורי 13, כולל טאבלט Surface 8 עם חלונות 11 ותוכנה ייעודית. המערכת כוללת תושבת נפתחת עם מצלמת רחוק ומקלדת אלחוטית ותיק ייעודי.

תפריט קרוב

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------------------------|--------|
| סגירת תוכנה | פיענוח תמונה לטקסט OCR | פתיחת קובץ שנשמר | שמירת תמונה וסרטון | הקטנה הגדלה | צבעים | מעבר למצלמת רחוק בהירות וניגודיות | הגדרות |
| | | | | | | | |

חץ לפתיחה ולסגירת תפריט



תפריט רחוק

| פיענוח | | שמירת תמונה | | הגדלה הקטנה | | צבעים | | תצוגה מפוצלת קרוב ורחוק | |
|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|---|-------|-------------------|-------------------------|--------|
| סגירת תוכנה | לטקסט OCR | פתיחת קובץ שנשמר | תמונה סרטון | + | - | צבעים | תצוגה יחידה לקרוב | תצוגה מפוצלת קרוב ורחוק | הגדרות |
| | | | | | | | | | |

חץ לפתיחה ולסגירת תפריט

הבהרות

1. שינוי בהירות וניגודיות יתאפשר רק במצב קרוב ובמצב מסך מפוצל.
2. על גבי מצלמת רחוק קיימים 2 לחצנים המאפשרים ביצוע Zoom.
3. הדלקה וכיבוי תאורה לקרוב יתבצע על ידי הזזת מפסק.
4. חיבור טעינת ה-Surface יתבצע ע"י הצמדת לשונית הטעינה שיתמגנט לצידו השמאלי של ה-Surface.
5. הסרת ה-Surface מהסטנד על ידי דחיפה קלה של נועל בצד ימין של המתקן. החזרת ה-Surface למקומו יתבצע כאשר לחצן הפעלת המכשיר ממוקם בצד שמאל למטה ומצלמת המכשיר ממוקמת בחלק התחתון של הסטנד.