



טמ"ס נייד ZooMax12 Snow

שקעים וכפתורי הטמ"ס:

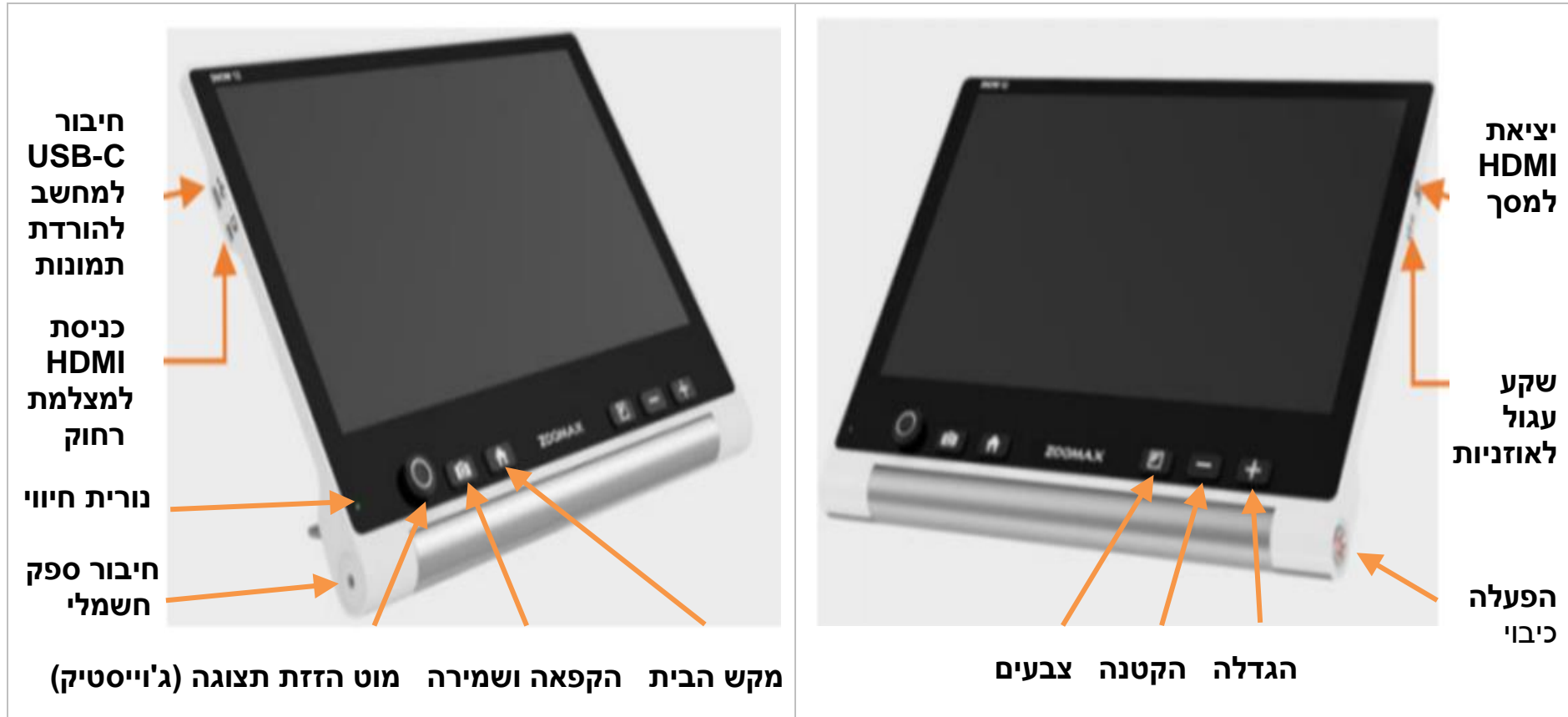

התושבות של הטמ"ס:

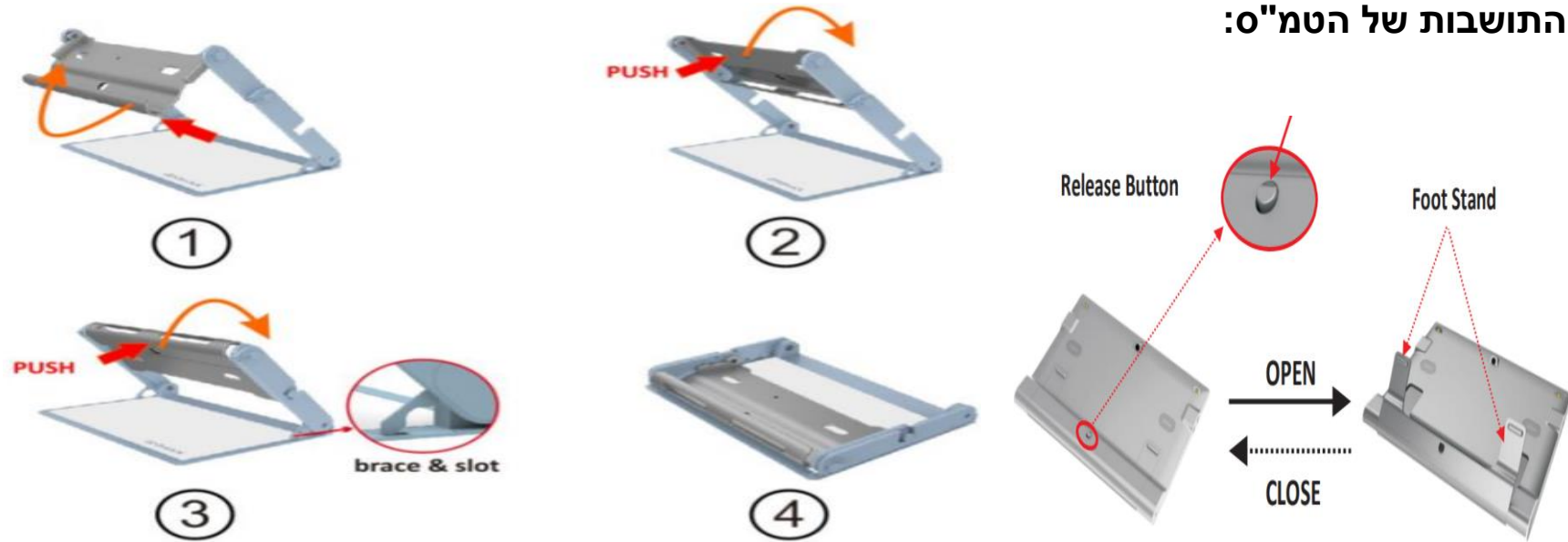

פרטים טכניים:

מתי להטעין את הטמ"ס:

זמן טעינה:

זמן עבודה רציף על סוללה:

ספק חשמלי:

טווח הגדלה:

משקל:

בצד שמאל למטה בתצוגה.



חבר את הספק החשמלי כשמופיע האייקון

או כשלוחצים על לחצן ההפעלה והטמ"ס אינו פועל.

2 שעות ונורת החיווי תדלק בצבע ירוק

3 – 2.5 שעות

15V DC / 4A

x19 – x2.5

960 גרם ללא תושבת

קריאת מסמך OCR (זיהוי תווים אופטי)

ניתן לבצע OCR על כל מסמך ולהקריא אותו בשפות שונות הנתמכות על ידי ה ZooMax12. השפות הנתמכות הן: אנגלית (ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, הודו), דנית, נורווגית, צרפתית (צרפת, קנדה), ספרדית (ספרד, ארה"ב), טורקית, רומנית, גרמנית, שוודית, פורטוגזית (פורטוגל, ברזיל), פולנית, איטלקית, רוסית, הולנד, צ'כית, הונגרית, סלובקית, סינית.

לפני קריאת מסמך בחר את שפת זיהוי התווים

שים לב, המכשיר בעל מסך מגע והבחירה תתבצע על ידי נגיעה במסך

1. לחץ על מקש **הבית** ולאחר מכן לחץ על **הגדרות** סמל של גלגל שיניים (פינה שמאלית למטה).
2. לבחירת השפה לחץ על סמל הגלובוס (שורה שניה מלמעלה, טור שני מימין).
3. בעזרת מוט ההזזה (ג'ויסטיק) בחר את השפה הרצויה, הזז את המוט למעלה או למטה.
4. לחץ על סמל חזור ליציאה. (פינה ימנית למטה).
5. במסך הבא ובמסך שלאחריו, לחץ שוב על סמל חזור ליציאה. (פינה ימנית למטה) עד ליציאה מהגדרות.

כניסה להקראת מסמך

1. מקם דף עם טקסט מודפס וקריא מתחת לטמ"ס.
2. לחץ והחזק את מקש **המצלמה**.
3. שים לב שהטקסט נראה במסך התצוגה. במידה והטקסט מטושטש, יש לנגוע במסך עם אצבע אחת לביצוע מיקוד של המצלמה.
3. לביצוע OCR, לחץ לחיצה קצרה על מקש **המצלמה**. יופיע סמל עם נקודות מסתובבות וישמעו תיקתוקי שעון. המתן לפתיחת הטקסט ולהקראתו.
4. בשלב זה יפתח סרגל שליטה ששולט על אופי ההקראה



תיאור הסמלים במסך מימין לשמאל: חזור, שמור, עוצמת קול + -, עצור, מהירות דיבור + -, כניסה למאגר תמונות, הסתרת סרגל סמלים. **שים לב**, במידה והמסך מחשיך ונורית החיווי בפינה השמאלית למטה דולקת **בצבע ירוק**, המכשיר נכנס למצב שינה. לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה על מנת להעיר את המכשיר.